



Czyszczenie ultradźwiękowe  
wg nowych przepisów.

# Elmasonic Med\*



**Elmasonic Med to seria wydajnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących, które zapewniają niezawodne czyszczenie wstępne instrumentów medycznych, dentystycznych i chirurgicznych oraz implantów. Za pomocą częstotliwości ultradźwiękowej 37 kHz można usunąć nawet uporczywe zabrudzenia. \*\***

**Myjki Elmasonic Med o pojemności wanny od 3 do 90 litrów (od Med 60 z odpływem) są odpowiednie do różnych zastosowań. Specjalistyczne środki czyszczące opracowane przez Elmę oraz praktyczne akcesoria, takie jak kosze, uchwyty na tace i wiele innych zapewniają najlepsze rezultaty czyszczenia.**

\*\*Zasadniczo Elmasonic Med NIE zastępuje przygotowania w termodezynfektorach.

### Opracowany dla

Placówki medyczne • szpitale • gabinety stomatologiczne,  
• sterylizatornie centralne • laboratoria  
dentystyczne • studia tatuaży i piercingu • salony  
podologiczne



### Czyści

Instrumenty chirurgiczne, medyczne i dentystyczne  
• protezy i implanty • instrumenty z branży  
podologii, tatuażu i piercingu



### Usuwa

Krew, pozostałości tkanki i kości • tłuszcze •  
wydzieliny • wióry zębiny • kamień nazębny • osady  
podstawowe • alginaty, gips • pasty do szlifowania i  
polerowania • woski • topniki • cement •  
pozostałości naskórka • inne zanieczyszczenia



## Clean



Zgodne z MDR

Myjki Elmasonic Med są zgodne z rozporządzeniem MDR (EU) 2017/745, zarejestrowane jako wyroby medyczne klasy I.



Design łatwy w utrzymaniu czystości

Powierzchnie ze stali szlachetnej są łatwe w czyszczeniu, także wyświetlacz i panel frontowy. Nowoczesny design.

## Inteligentne



5 indywidualnych trybów ultradźwiękowych

degas: szybkie odgazowanie  
 eco: cicha, energooszczędna praca, dłuższa żywotność urządzenia  
 sweep: bardziej równomierne czyszczenie ultradźwiękowe  
 pulse: w przypadku uporczywych zabrudzeń  
 dynamic: automatyczna zmiana między pulse a sweep w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników czyszczenia



Możliwość zapisania własnych programów

Cztery indywidualne programy czyszczące można zapisać w menu i aktywować poprzez szybki wybór – dla niezawodnych procesów i powtarzalnych wyników czyszczenia.

## Łatwe



Intuicyjność i zorientowanie na użytkownika

Czytelny i przejrzysty wyświetlacz umożliwia proste i precyzyjne ustawienie parametrów czyszczenia.



Feedback urządzenia

Dzięki wyświetlaczowi i komunikatom ostrzegawczym, np. po zakończeniu czyszczenia lub po osiągnięciu temperatury granicznej użytkownik jest zawsze informowany o aktualnym stanie pracy.

## Bezpieczne



Inteligentna technologia

Temperatura graniczna jest ustawiana indywidualnie. Może to zapobiec denaturacji białka. Cenne instrumenty są chronione i idealnie czyste.



Ochrona użytkowników

Pokrywa z tworzywa sztucznego redukuje hałas, zapewniając tym samym ciszę w miejscu pracy. Po czyszczeniu służy jako praktyczna taca do ociekania kosza i części.



**Elma Schmidbauer GmbH**  
Gottlieb-Daimler-Str. 17  
78224 Singen (Germany)

**Dystrybutor:**

**[www.elma-polska.pl](http://www.elma-polska.pl)**

**Profi-line**

**Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża**

**Tel. 791 965 995**

**E-mail: [elmasonic.info@gmail.com](mailto:elmasonic.info@gmail.com)**

Wszelkie zmiany techniczne zabronione.  
Elmasonic Med\_DE\_01\_20

\*Wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem o  
wyróżach medycznych ( EU) 2017/745.